

ベリーバッグ

RUSCH BELLY BAG


ZP9905-01-0



取扱説明書

ご使用に際しご不明な点は、かかりつけの医師又は医療機関にご相談ください。ご使用の際は必ず担当の医師へご相談の上、使用上の注意事項をよく読んでからお使いください。

ベリーバッグの外観

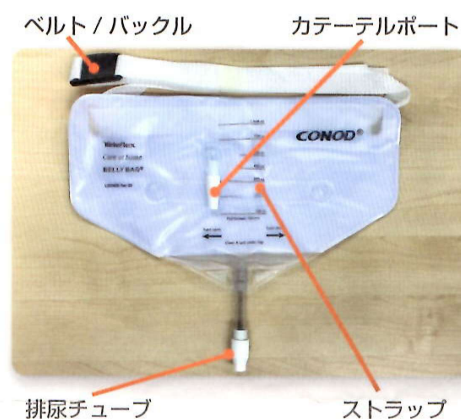

ご使用上の注意

1. 使用上障害となる傷、破損が見られた場合は、使用しないこと。
2. ベリーバッグは外部カテーテル（ウロシースやコンドームカテーテル）と併用することは出来ません。
3. バッグを空にした後、カテーテルからバッグへ尿がスムーズに流れることを確認ください。
4. バッグ交換の頻度は、医師の指示がない限り30日を目安としてください。
5. ベリーバッグは単回使用製品であり、再使用や再滅菌をおこなって使用できません。
6. 発熱や違和感などを感じた場合は直ちにかかりつけの医師や医療機関に相談してください。
7. 水漏れ、高温、多湿、直射日光を避け、常温で清潔な場所に保管してください。

総販売元

株式会社リレート
〒581-0087

大阪府八尾市明美町1丁目1番24号
Tel. 072-940-6804 Fax. 072-940-6805

製造販売業者 **Teleflex®**

テレフレックスメディカルジャパン株式会社
〒163-0805
東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NSビル

ベリーバッグの使用方法

ベリーバッグの使用方法について、順を追ってご説明いたします。以下の指示に従って、ベリーバッグを装着ください。

バッグの取り付け方

- 1 石鹸や流水でよく手を洗い、清潔なタオル等で水分をしっかりと拭き取ってください。
- 2 バッグを腹部にあてる。バッグは直接皮膚に触れても、下着の上に着けてもかまいません。
- 3 ベルトを腰部にまわし、バックルをはめ込み、右側に位置させます。
- 4 ベルトをきつくなりすぎないように締めます。
- 5 10cm くらいの長さを残して切り落とします。
- 6 清潔な手でストラップから排尿チューブを取り出しバルブを左に半分まわして閉じます。
- 7 排尿チューブをストラップの下に押し込みます。
- 8 カテーテルの先をカテーテルポートにしっかりとフィットするまで押し込みます。このとき細菌の混入を防ぐため、カテーテル（別売品）とカテーテルポートの先端を指で触れないようにしてください。
- 9 尿がカテーテル（別売品）から流れていることを確認する。異常がある場合は医師に相談してください。
- 10 バッグを取り外す際はベルトバックルを外してください。

排尿方法

- 1 トイレの前に立つか、腰をかけ、排尿チューブを下にむけてください。
- 2 チューブのキャップを右にひねって開け、トイレに尿を排尿する。
- 3 排尿の後、チューブを左にひねって閉める。